

# ReTurn7500i

SystemRoMedic

SWL 150 kg

Vakiokorkuinen nousutuki –  
sopii useimmille aikuisille käyttäjille

Poistaa raskaat nostot avustajalta

Aktivoi ja tukee avustettavan  
tasapainoa ja jalkojen voimaa

Patentoitu\* rakenne

Aukko ReTurnBeltin kiinnittämistä varten

Paljon erilaisia otemahdollisuuksia

Vakiokorkuinen nousutuki

Säädettävät säärivet  
lisäpehmusteella

Suuret jarrupolkimet, joissa on  
luistamattomat värimerkinnot helppoon  
ja turvalliseen käsittelyyn

Selkeät merkinnät  
käyttäjän jaloille

Nousutuen tukeva kiinnitys

HeelStrap-kiinnitysreikä

Matala  
askelmakorkeus

Vakaa pohjalevy

Syvennys  
WC-istuimelle

## Siirtolaite

SystemRoMedic™ ReTurn7500i on apuväline seisomaannousuun ja siirtoihin, mutta laite toimii myös harjoitusvälineenä. ReTurn7500i tarjoaa turvallisen ja aktiivisen seisomaannousun ja siirron sänkyyn, pyörätuoliin tai wc:hen tai toisin päin. ReTurn7500i:ta voidaan käyttää myös apuvälineenä asennon kohentamiseen taaksepäin pyörätuolissa tai tuolissa.

**DHG**  
Moving Health Forward

# ReTurn7500i

## Helppokäyttöinen ja monipuolinen

ReTurn7500i on manuaalinen seisomaan nousemisen ja siirtämisen apuväline, jolla voidaan monin eri tavoin auttaa käyttäjää nousemaan seisomaan ja kohentamaan asentoa istuallaan sekä siirtämään lyhyitä matkoja sisätiloissa. ReTurn7500 toimii myös harjoitusvälineenä ja sen ansiosta erinomainen apu kuntoutusprosessissa.

ReTurn7500i-siirtolaitteessa on useimmille aikuisille käyttäjille sopiva vakiokorkuinen nousutuki (patenttia haettu\*\*), jossa on aukko ReTurnBeltin nopeaan ja helppoon kiinnittämiseen. ReTurn7500i on tarkoitettu enintään 150 kg painaville käyttäjille.

## Helposti ohjattava

Ainutlaatuisen, patentoidun\* rakenteen ansiosta ReTurn7500i-siirtolaite on helposti ohjattava. ReTurn7500i kulkee, kääntyy ja pyörii helposti ja tasaisesti kaikilla pinnoilla, myös ahtaissa tiloissa. ReTurn7500i on helppo sijoittaa sängyn, pyörätuolin tai WC-istuimen ääreen, ja sen liikuttelu vaatii vain vähän työntövoimaa, vaikka käyttäjä olisi isokokoinen ja painava.

## Vakaa pohjalevy

Matalalla oleva painopiste ja suuri tukipinta, jonka kaikissa kulmissa on pyörät, tekevät pohjalevystä vakaan ja tukevan. Nousutuen keskellä on kaksi suurta, kiinteää ja lukittavaa pyörää, joiden ansiosta ReTurn7500i rullaa kevyesti ja suuntavakaasti. Kulmissa olevat kääntyvät pyörät helpottavat ohjaamista.

## Nousutuki mahdollistaa luonnollisen liikemallin ja lähellepääsyn

ReTurn7500i-siirtolaitteen nousutuessa on avoin alaosa, kun taas yläosa tarjoaa paljon otomahdollisuuksia, mukaan lukien keskikohdan puristusote. Nousutuki nojaa eteenpäin käyttäjästä pois päin, joten käyttäjällä on runsaasti tilaa ja mahdollisuus päästä lähelle apuvälinettä "kiivetäkseen" ja/ tai vetääkseen itsensä ylös seisomaan. Nousutuki myös tukee käyttäjää seisomaharjoittelun ja siirtojen aikana. Rakenteen ansiosta myös avustajalla on tilaa olla lähellä ja tukea käyttäjää eri suunnista.

Säätökäytöksi voidaan säätää sekä korkeus- että vaakasuunnassa. Ne voidaan säätää myös kulmittain, joten säädöt on helppo tehdä yksilöllisesti käyttäjän pituuden ja muiden ominaisuuksien mukaan eri tilanteissa. Tämän ominaisuuden ansiosta useat henkilöt voivat käyttää samaa ReTurn7500i-siirtolaitea. Uudessa ReTurn7500i-versiossa on säätökäytön lisäpehmuste vakiovarusteena.

ReTurn7500i on helppo koota ja purkaa kuljetusta ja varastointia varten.

## TUOTEKUVAUS

Tuotenumero	Tuotenimi	Kuvaus
7500i	ReTurn7500i	Siirtolaite, jossa on vakiokorkuinen nousutuki ja aukko ReTurnBeltin kiinnittämistä varten
7501	ReTurn7500	Vakiokorkuinen nousutuki ReTurn7500-siirtolaitteeseen alkaen sarjanumerosta 373317697500500001 ja ReTurn7400-siirtolaitteeseen alkaen sarjanumerosta 373317697400500001
7501i	ReTurn7500	Vakiokorkuinen nousutuki, jossa on aukko ReTurnBeltin kiinnittämiseksi, ReTurn7500-siirtolaitteeseen alkaen sarjanumerosta 373317697500500001 ja ReTurn7400-siirtolaitteeseen alkaen sarjanumerosta 373317697400500001
7401	Rising ladder, low	Matala nousutuki ReTurn7400-siirtolaitteeseen alkaen sarjanumerosta 373317697400500001 ja ReTurn7500-siirtolaitteeseen alkaen sarjanumerosta 373317697500500001

## KÄYTTÖTARKOITUS

ReTurn7500i on siirrettävä lääkinällinen laite, joka yhdessä hyväksytyjen lisävarusteiden kanssa tukee potilaiden istumaannousua sekä siirtämistä sisätiloissa lyhyitä matkoja. ReTurn7500i vähentää hoitajien vammojen riskiä hoitotilanteissa. Tarkoitettu hoitajille, jotka voivat lukea ja ymmärtävät nostimen käyttöohjeet. tarkoitettu sekä kotihoitoon että laitoshoitoon.



CE MD ReTurn7500i täyttää lääkinällisten laitteiden asetuksen 2017/745 luokan 1 tuotteille asetetut vaatimukset.

Lisätietoja: [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com).

## SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ on kokonaisvaltainen ratkaisu potilaiden helppoon siirtoon. Konseptin sisältämät neljä tuotealuetta täyttävät useimmat tarpeet erilaisissa siirtotilanteissa. Siirtäminen paikasta toiseen. Asennon kohentaminen samassa paikassa. Tukeminen liikkumisen helpottamiseksi. Nostaminen sekä käsin että mekaanisesti.



**Direct Healthcare Group Sverige AB**  
Torshamnsgatan 35, SE-164 40 Kista, Sweden  
Tel: +46 (0)8-557 62 200  
info@directhealthcaregroup.com  
www.directhealthcaregroup.com



ReTurn7500i- ja ReTurn7400-laitteissa on sama tukeva pohjalevy, joten vakiokorkuinen nousutuki on helppo vaihtaa matalaan nousutukeen ja toisin päin tarpeen täyttämiseksi ja laitteen hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

## TEKNISET TIEDOT

Suurin sallittu potilaan paino (SWL)	150 kg
Kokonaiskorkeus	1 150 mm
Pohjalevy, pituus x leveys x korkeus	685 x 570 x 40 mm
Paino	16,5 kg

## LISÄVARUSTEET

Käyttäjän tukea ja turvallisuutta seisomaan nousemisen, seisomaharjoittelun ja liikkumisen yhteydessä voidaan parantaa liittämällä ReTurn7500i-siirtolaitteeseen erilaisia lisävarusteita. Valittavat lisävarusteet määräytyvät kulloinkin tilanteen sekä käyttäjän tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan.

Tuotenumero	Tuotenimi	Kuvaus
6031-6038	ReTurnBelt***	Koko XXS-XXXX
6233-6236	ReTurnBelt, kertakäyttöinen	Koko S-XL
6061	SupportStraps	Vyön lisävaruste
7250	HeelStrap	Kantapäähihna
7215	Padding for leg support	Säätietuen pehmuste
954	Bag	Laukku

## ReTurnBelt-kokotaulukko

Koko	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Mitat	65-80 cm	80-90 cm	90-105 cm	105-125 cm	125-145 cm	135-155 cm	155-175 cm	175-195 cm

\* Patentti: SE-0300528-7 \*\* Patentinhakemus: PCT/SE2012/050160 Rekisteröity EU-malli: RCD-529631-1 \*\*\* Patentti: SE-0401517-8

## Eri ReTurn-mallit tarjoavat ratkaisuja kaikkiin tilanteisiin ja kaikille käyttäjille

ReTurnin perusajatuksena on ylläpitää ja vahvistaa käyttäjän omia voimia. Sen vuoksi kaikki ReTurn-mallit edistävät käyttäjän aktivoitumista ja kannustavat luonnollisen liikemallin käyttöön.



ReTurn7400



ReTurn7600